

CA050 CLEANER

Solución de limpieza de uso en los analizadores de coagulación automatizados



REF	Código	Presentación
	06060	30 mL

USO PREVISTO

Solución de limpieza de uso en los analizadores de coagulación automatizados.

PRINCIPIO

Solución para mantenimiento y limpieza diaria en los analizadores de coagulación automatizados. Consulte el manual de operador para más información respecto al procedimiento y principio del análisis.

INGREDIENTE ACTIVO

HIPOCLORITO DE SODIO 1,0% - Listo para su uso

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS

El reactivo está listo para su uso.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD







- Almacenar entre 15 - 30°C protegido de la luz.
- Si el producto presenta cualquier signo de contaminación o cambio de color no deberá ser usado.
- CA050 Cleaner tiene una estabilidad de 12 meses. Su fecha de caducidad viene impresa en la etiqueta del recipiente.
- No congelar.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Utilice guantes de laboratorio, para manipular el producto
- Evite el contacto con los ojos, piel y vestimenta.
- Mantenga el frasco cerrado cuando no lo utilice.
- No utilice el reactivo si hay evidencia de deterioro.
- Una vez utilizado, debe desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.

INSTRUCCIONES DE USO

Lista para usar. Cuando el instrumento no está en uso, retirar, tapar y conservar a la temperatura adecuada y protegido de la luz.

Índice de Símbolos					
	Para usar consulte las instrucciones	REF	Referencia o Código		Límite de Temperatura
LOT	Número de Lote		Precaución		Fabricante
	Fecha de Caducidad		Fecha de Fabricación		